

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE MODEL 6770



Relaxačný masážny prístroj plusOne Meno Glow

Údržba:

Pred prvým použitím a po každom použití opláchnite zariadenie teplou mydlovou vodou.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu pri vzájomnom kontakte poškodiť.

Kvalita:

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

Dôležité pokyny:

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať, po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 90 minútach. Používajte iba mazivo na báze vody. Plne vodotesný pre zábavu vo vani a v sprche

Varovanie:

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.


Tlačidlo napájania:

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Prijmite zmeny a prejdite do ďalšej fázy života s istotou a pomocou zariadenia navrhnutého v spolupráci s lekármi. Relaxačný masážny prístroj Meno Glow od spoločnosti PlusOne ponúka úľavu od príznakov perimenopauzy a menopauzy. Tento gynekológmi schválený masážny prístroj pomáha uvoľniť svaly a zvýšiť prietok krvi pomocou dvoch motorov, 10 prispôsobiteľných nastavení vibrácií a režimu vyhrievania. Tepelný režim a vibrácie pomáhajú uvoľniť svaly, zvýšiť prietok krvi a udržiavať vagínu aktívnu.

Poskytuje jemnú podporu počas menopauzy vďaka svojmu štíhlemu a zakrivenému tvaru, ktorý sa dá ľahko zaviesť a zaručuje pohodlie. Je obojstranná, má dve veľkosti na vkladanie a nezávislé motory na každej strane, aby sa prispôbila potrebám vášho tela v každej fáze. Zaslúžite si, aby ste sa v tomto prechodnom období cítili silná a sebavedomá.

Ako používať masážny prístroj Pleasure Beast Pulse Stimulator:

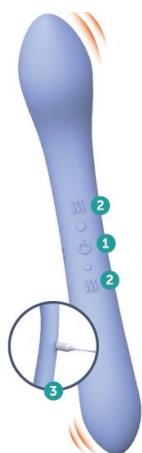

Tlačidlo napájania - Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zapnete/vypnete. Stlačením okrúhlych tlačidiel nad a pod tlačidlom napájania môžete prepínať medzi 10 vibračnými režimami na každom konci.

Tlačidlá ohrevu - Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete/vypnete. Kontrolka LED bude pulzovať na indikáciu ohrevu a po dosiahnutí plného ohrevu bude svietiť nepretržite.

Nabíjací port - Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu ku kontaktnému bodu na nabíjanie.



Vaginálna starostlivosť

Tento prístroj používajte ako nástroj na rozšírenie vaginálneho kanála a prevenciu suchosti spôsobenej perimenopauzou a menopauzou. Nezabudnite používať osobný lubrikant.



Rozcvička

Technológia zahrievania sa zahrieva tesne nad telesnou teplotou, čím poskytuje príjemný pocit a zároveň stimuluje prietok krvi.



Vytvorenie relaxačnej oázy

Vyberte si ideálnu veľkosť a prepínajte medzi rôznymi vibračnými režimami pre dokonalú relaxáciu a spokojnosť.

Ako nabíjať



1. nabíjací kontakt je malý kovový krúžok umiestnený na spodnej strane zariadenia



2. vyrovnajte magnetickú nabíjaciu hlavu s kontaktom.



3. kábel je magneticky zacvaknutý na mieste. Kontrolka LED tlačidla napájania bude pomaly blikať, aby signalizovala nabíjanie

Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu. Na plné nabitie vydrží až 1,5 hodiny.

Veľkosť výrobku: rozmery v centimetroch sú: 5,08 cm × 7,62 cm × 12,7 cm.

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju. Používatelia nesmú batériu vyberať ani vymieňať sami, mohli by zariadenie poškodiť.



Balenie obsahuje: plusOne Relaxačný masážny prístroj Meno Glow, úložnú tašku, nabíjací kábel a návod na použitie.